

水に濡らして



TEIJIN *NANOFRONT*<sup>®</sup> 使用

日本製

# 加湿&保湿で体調管理

## 洗って繰り返し使える ナノガーゼ

**抗菌効果**

実測：広島県環境保健協会調査

TEIJIN *NANOFRONT*<sup>®</sup> 使用

**呼吸快適!**

「マスク曇り」サヨナラ!



**肌に優しい**

メガネが曇りにくい!

## マスクの内側にのせるだけ!

ノーズワイヤーの位置に合わせ、鼻にガーゼがかかるように押さえながら着用してください



詳細はこちら!



TEIJIN *NANOFRONT*<sup>®</sup>

TEIJINナノフロント<sup>®</sup>は髪の毛の直径7500分の1の細い糸なので肌に優しく高い抱水力が有ります。冷潤ガーゼ(ナノフロント82%使用)はその機能を最大限に生かしています。


【サイズ】縦9.5cm × 横12cm 【品質表示】ポリエステル

4枚入り



## 使用方法


水に濡らして使用することで加湿&保湿マスクに!

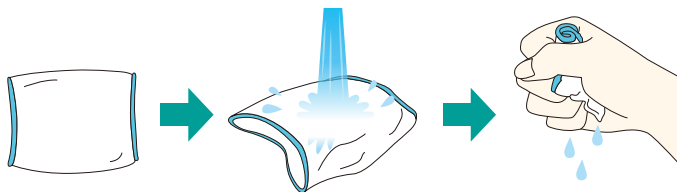

水でたっぷり濡らし、**しっかり絞ります**。ナノガーゼは1～2時間に1回は水道水で洗って、この手順を繰り返します。

鼻にガーゼがかかるように着用してください

ノーズワイヤーの位置に合わせ、鼻にガーゼがかかるように押さえながら着用してください

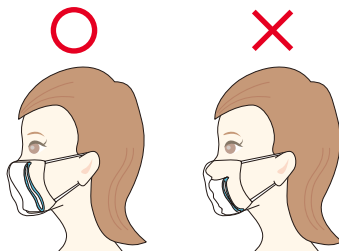

❗ 表裏があるので  
ご注意ください。



青い口が見える状態が正しい状態です。

市販の使い捨てマスク、  
布マスク、ウレタンマスク等

全てのマスクに使用できます!

❗ ※ナノガーゼは直接口に当たるため、誤飲の恐れがある方は本商品を使用しないでください。

### 【洗濯方法について】

- ①衣料用洗剤で、もみ洗いではなく、軽く押し洗いしてください。
  - ②十分なすすぎをしてください。
  - ③乾燥機は使わず、陰干しで自然乾燥してください。
- ※一日一回の洗濯頻度を推奨しますが、汚れがつきまじたら、その都度洗濯してください。

### 【漂白剤・柔軟剤の使用について】

- 汚れが気になる場合は、塩素系漂白剤を使い、においがなくなるまで十分なすすぎをしてください。
  - 柔軟剤の使用は避けてください。
- ※漂白剤を使用する場合は、炊事用のゴム手袋などをご利用ください。

### 【洗濯表示】



検針済



説明書



袋: PE, PP

※上記以外での洗濯は著しい収縮を招き本来の機能を失いますので指定の洗濯を行ってください。

PEARLSTAR

株式会社コーポレーションパールスター

製造販売元



パールスター

〒739-2402 広島県東広島市安芸津町三津4424番地  
TEL 0846-45-0116 FAX 0846-45-0150

Email [parlstar@pastel.ocn.ne.jp](mailto:parlstar@pastel.ocn.ne.jp) <http://www.corporation-pearlstar.com/>