

一般医療機器

届出番号 34B3X10008000001

弾性ストッキング 31724000

むくみ対策くつ下

日本製



ソフトな漸減的フィット
締めつけない

肌に優しい 綿68%

その他：ポリウレタン、ナイロン、アクリル、ゴム


効果

静脈還流の促進により

血行促進・リンパの流れ促進

つま先アップで脚の運動を自然に促し 締めつけずにむくみ対策!!

歩行促進で運動量増加

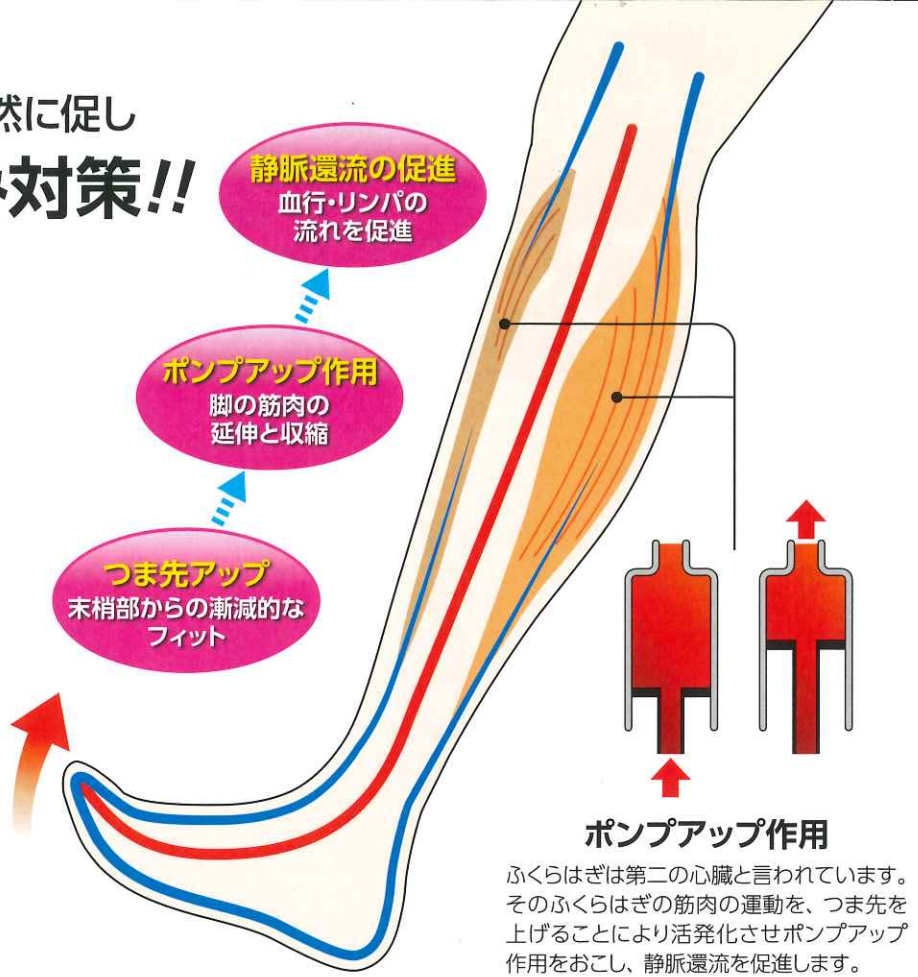

むくみ対策くつ下と通常の着圧ソックス(当社製)の比較

【勤務前・勤務後のむくみ度比較】

精神科看護師・医療職者
普段からむくみを感じている者 対象 約28名

| | むくみ度 (cm) | | |
|-----------------|-----------|------|------|
| | 足首部 | 腓腹部 | 大腿部 |
| 勤務前 着圧ソックス(当社製) | 22 | 33.2 | 46.4 |
| 勤務後 着圧ソックス(当社製) | 22.3 | 34.1 | 46.9 |
| 勤務前 むくみ対策くつ下 | 22 | 33.2 | 46.4 |
| 勤務後 むくみ対策くつ下 | 21.8 | 32.8 | 46.1 |


※当社製比較

【着用時の使用満足度比較】

精神科医療職者・総合病院医療職者 約220名



むくみ対策くつ下

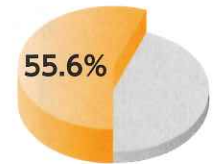

着圧ソックス(当社製)

【保守・点検に係る事項】

- 1) 繰り返し使用する場合は、傷やほつれ、繊維の劣化等が無いことを確認してから使用してください。
- 2) 洗濯の際には、塩素系漂白剤は絶対に使用しないでください。
- 3) はきやすさを保つために中性洗剤・柔軟剤を使用し水か30℃位のお湯で必ず手洗いしてください。やむを得ず洗濯機をご使用の際は、必ずネットに入れて洗濯してください。
- 4) その他の取り扱い方法はパッケージの表示マークに従ってください。



※上記以外での洗濯は著しい収縮を招き靴下本来の機能を失いますので指定の洗濯を行ってください。

| サイズ | 22~23cm | 23~24cm | 24~25cm | 25~26cm | 26~27cm | 27~28cm |
|---------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| サイズ別内側色 | 白 | グレー | 黒 | 茶 | コン | ベージュ |
| 靴下カラー | ○白 ●黒 ●ベージュ | | | | | |



製造販売元

株式会社コーポレーションパールスター

第三種 医療機器製造販売業許可番号 34B3X10008

医療機器製造業許可番号 34BZ200022

〒739-2402 広島県東広島市安芸津町三津4424番地

TEL 0846-45-0116 FAX 0846-45-0150

メールアドレス parlstar@pastel.ocn.ne.jp

http://corporation-pearlstar.com

パールスター 検索

発売元